

HYALUXE *con Lidocaína*

تتميز بالفخامة والتميز

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO



HYALUXE LIPS	
HYALUXE DEEP	
HYALUXE SHAPE	




HYALUXE *con Lidocaína*

ÁCIDO HIALURÓNICO RETICULADO

Gel homogéneo y ultrasuave, de fácil aplicación y moldeado preciso.

- Contiene **ácido hialurónico** altamente purificado (24–26 mg/mL) con **lidocaína** 0.3% para mayor confort.
- Su viscoelasticidad optimizada permite una **integración natural** en los tejidos, garantizando **resultados estables y duraderos**.
- Desarrollado con **tecnología avanzada** de reticulación unificada, ofrece una textura sin partículas visibles y una presión de inyección suave y controlada.
- **Nivel de endotoxinas** < 0.025 EU/mL, asegurando pureza y máxima biocompatibilidad.


HYALUXE LIPS

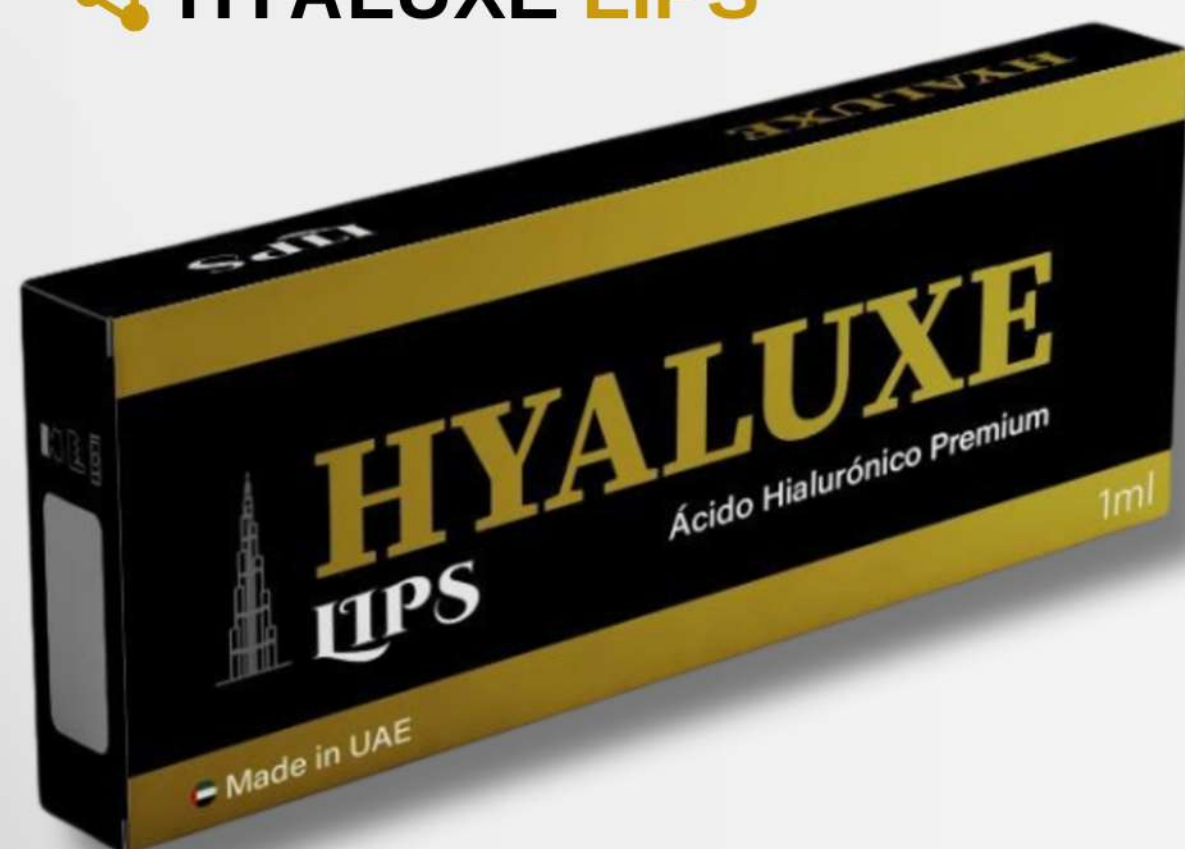

HYALUXE DEEP



HYALUXE SHAPE

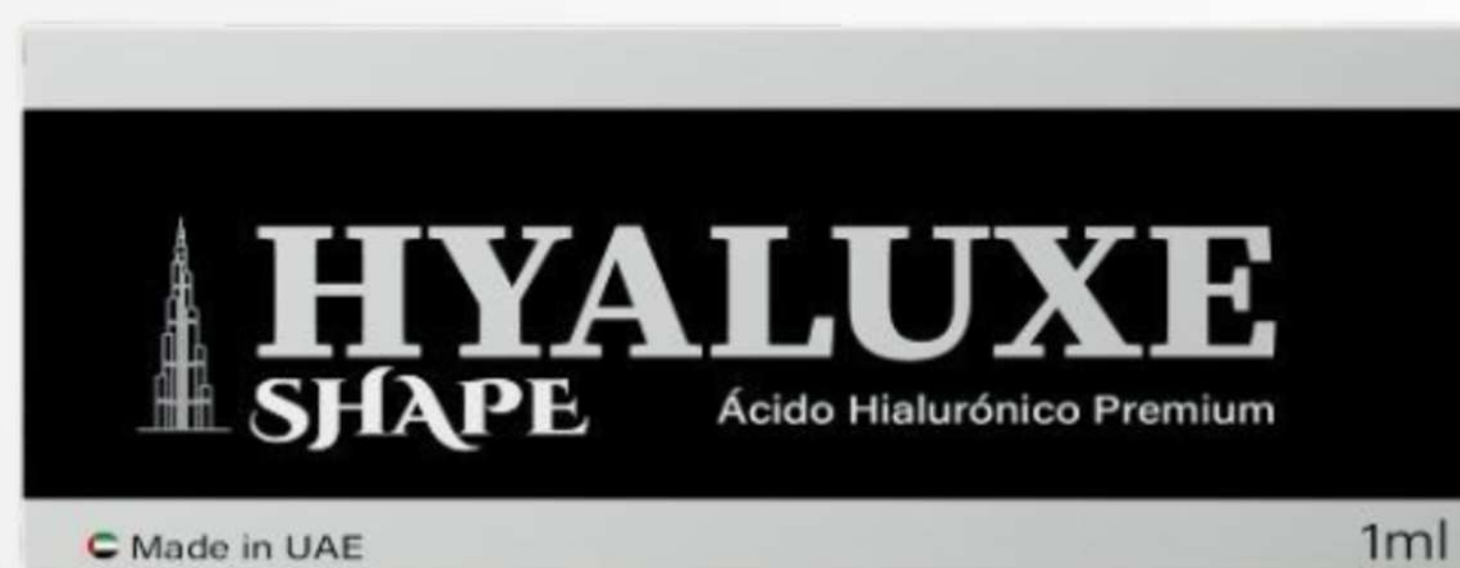



HYALUXXE

con Lidocaína



Lo último en suavidad y durabilidad Gel hialurónico bifásico

Contenido HYALUXE



Reticulación precisa y homogénea.

Viscoelasticidad equilibrada.

Alta cohesión y pureza clínica.

Plasticidad flexible con excelente integración tisular.

HYALUXE es una línea de rellenos dérmicos de nueva generación, desarrollada con tecnología avanzada de **ácido hialurónico reticulado bifásico**. Su estructura molecular homogénea, libre de partículas visibles, garantiza una aplicación suave, segura y precisa, ofreciendo resultados naturales y duraderos.

La línea HYALUXE cuenta con tres versiones especializadas —**LIPS**, **DEEP** y **SHAPE**—, diseñadas para adaptarse a distintas profundidades y necesidades estéticas del rostro: desde la hidratación y definición labial, hasta la corrección de arrugas profundas y el modelado facial estructural.



El producto ha sido diseñado con un equilibrio ideal entre **elasticidad y viscosidad**, lo que permite una perfecta integración en los tejidos, adaptándose de forma dinámica al movimiento facial sin perder forma ni consistencia. Su composición incluye **lidocaína al 0.3%**, para un procedimiento más cómodo y sin molestias significativas.

Especificaciones Técnicas

HYALUXE LIPS

Parámetro

Detalle Técnico



Concentración de Ácido Hialurónico (mg/mL)	24 mg/mL
Contenido de Lidocaína (mg/mL)	3 mg (0.3%)
Grado de Modificación (BDDE, mol %)	1.5 – 1.8%
Tipo de Gel	Bifásico
Módulo de Almacenamiento (G')	80 – 120 G'
Viscosidad Compleja (η^*)	150 – 300 Pa·s
Fuerza de Inyección (N) (30G UTW)	18 – 22 N
Profundidad de Inyección	Dermis media / profunda – Subcutáneo
Duración del Efecto	9 – 12 meses
Aguja Incluida	1 x 27G

HYALUXE DEEP

Parámetro

Detalle Técnico



Concentración de Ácido Hialurónico (mg/mL)	25 mg/mL
Contenido de Lidocaína (mg/mL)	3 mg (0.3%)
Grado de Modificación (BDDE, mol %)	1.5 – 1.8%
Tipo de Gel	Bifásico
Módulo de Almacenamiento (G')	180 – 250 G'
Viscosidad Compleja (η^*)	250 – 450 Pa·s
Fuerza de Inyección (N) (30G UTW)	26 – 30 N
Profundidad de Inyección	Dermis profunda – Subcutáneo
Duración del Efecto	9 – 15 meses
Aguja Incluida	1 x 27G

HYALUXE SHAPE

Parámetro

Detalle Técnico



Concentración de Ácido Hialurónico (mg/mL)	26 mg/mL
Contenido de Lidocaína (mg/mL)	3 mg (0.3%)
Grado de Modificación (BDDE, mol %)	1.5 – 1.8%
Tipo de Gel	Bifásico
Módulo de Almacenamiento (G')	300 – 400 G'
Viscosidad Compleja (η^*)	400 – 600 Pa·s
Fuerza de Inyección (N) (30G UTW)	33 – 38 N
Profundidad de Inyección	Subcutáneo profundo
Duración del Efecto	12 – 18 meses
Aguja Incluida	1 x 27G

Propiedades del Material

Estructura del Gel



- **HYALUXE** se diferencia de los productos bifásicos tradicionales por su matriz homogénea avanzada, libre de partículas visibles.
- Esta **característica** permite una inyección más fluida y uniforme, reduciendo significativamente el riesgo de nódulos, irregularidades o asimetrías posteriores al tratamiento.
- Su **consistencia** estable garantiza una integración natural con los tejidos, ofreciendo un resultado más armónico y predecible.

Equilibrio Estructural

- La formulación de HYALUXE combina una **alta elasticidad** (G') con una **alta viscosidad** (η^*), logrando un comportamiento ideal para procedimientos faciales dinámicos.
- Esta relación asegura una excelente **adaptabilidad** al movimiento muscular, evitando la rigidez del tejido y permitiendo que el gel conserve su forma dentro del plano subcutáneo.
- El resultado es una mayor estabilidad del **relleno dérmico** y una prolongación del efecto estético en comparación con los productos bifásicos convencionales.



Biocompatibilidad y Seguridad




- El **ácido hialurónico** utilizado en HYALUXE es no derivado de origen animal y se somete a un proceso de purificación rigurosa, eliminando impurezas y reduciendo el riesgo de reacciones alérgicas o inflamatorias.
- Su **biodegradación** natural ocurre mediante la acción de la hialuronidasa endógena, transformándose gradualmente en agua y dióxido de carbono.
- Este **proceso** asegura un metabolismo seguro, reversible y totalmente biocompatible, cumpliendo con los estándares internacionales de seguridad médica para productos estéticos inyectables.

Funciones y Aplicaciones Clínicas


HYALUXE es una línea de rellenos dérmicos de nueva generación, desarrollada con tecnología avanzada de **ácido hialurónico reticulado bifásico**. Su estructura molecular homogénea, libre de partículas visibles, garantiza una aplicación suave, segura y precisa, ofreciendo resultados naturales y duraderos.

HYALUXE LIPS Zona de Aplicación Función Específica

	Labios	Volumen e hidratación natural.
	Marcaje de labios	Define y perfila el contorno.
	Orejas	Restaura volumen en el lóbulo.
	Ojeras	Corrige hundimiento y suaviza el surco.
	Frente	Alisa líneas finas y mejora la textura.


Propósito Clínico: Ideal para tratamientos de rejuvenecimiento y perfeccionamiento del volumen labial y de la zona perioral. Aporta hidratación, volumen controlado y definición sin rigidez.

HYALUXE DEEP Zona de Aplicación Función Específica

	Surcos nasogenianos	Rellena y suaviza pliegues profundos.
	Rinomodelación	Corrige y define el perfil nasal.
	Mandíbula	Aporta firmeza y marca el contorno.
	Mentón	Proyecta y equilibra el perfil facial.
	Labios	Brinda volumen estructurado y definición.

Propósito Clínico: Diseñado para tratar arrugas profundas y surcos pronunciados, aportando firmeza y soporte estructural sin comprometer la movilidad facial.

HYALUXE SHAPE Zona de Aplicación Función Específica

	Perfilado mandibular	Redefine el contorno y aporta soporte.
	Mentón	Proyección y equilibrio facial.
	Pómulos	Eleva y restaura volumen perdido.
	Técnica BAP	Mejora firmeza y densidad cutánea.
	Arrugas profundas	Rellena y alisa pliegues marcados.

Propósito Clínico: Indicado para contorno facial y modelado avanzado. Su densidad y cohesión estructural permiten proyección, soporte y simetría, logrando un rostro armónico y definido.

Mapa facial

● HYALUXE LIPS, DEEP Y SHAPE

● HYALUXE LIPS


Labios, marcaje de labios, relleno de orejas, ojeras y frente.

● HYALUXE DEEP

Surcos nasogenianos, rinomodelación, mandíbula, mentón y labios.

● HYALUXE SHAPE

Perfilado mandibular, mentón, pómulos, técnica de BAP y arrugas profundas.

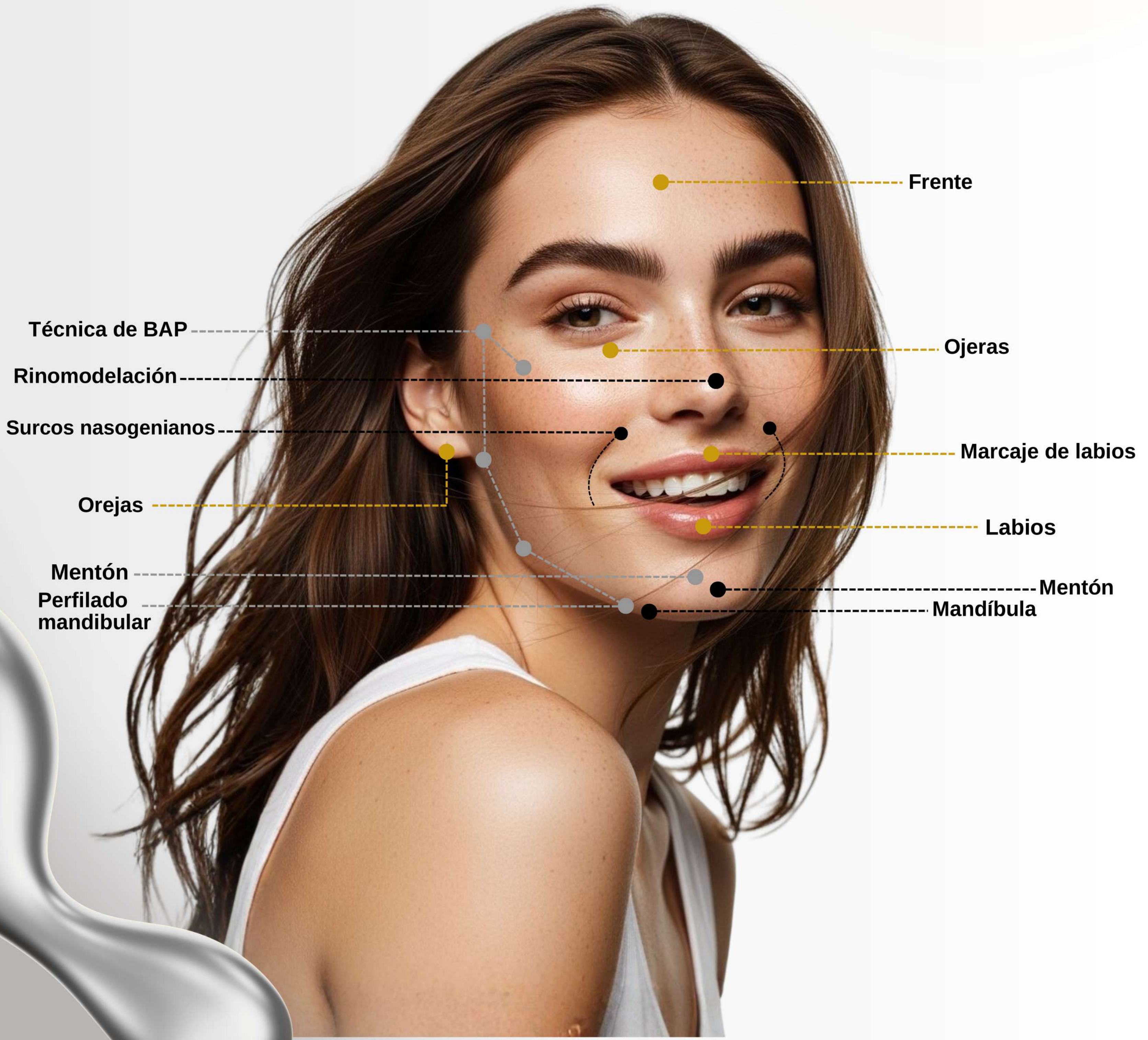



HYALUXE LIPS, DEEP Y SHAPE

Efectos secundarios previstos

El profesional médico debe de informar al paciente que , como en todo procedimiento de relleno dérmico a base de Ácido Hialurónico reticulado, pueden presentarse reacciones adversas, que pueden ser tratadas por el especialista, generalmente transitorias y de poca frecuencia.

Entre los posibles efectos secundarios se incluyen enrojecimiento temporal, hinchazón, dolor localizado, prurito, cambio de coloración o sensibilidad en la zona tratada. Estas manifestaciones suelen desaparecer de manera espontánea en un lapso de 3 a 7 días.

En casos poco frecuentes, pueden presentarse nódulos o una leve induración en el sitio de aplicación, generalmente asociada a una técnica de inyección incorrecta o manipulación posterior.

Asimismo, si el producto es aplicado de forma inadecuada o por personal no certificado, existe el riesgo de complicaciones más severas como necrosis, granulomas o reacciones de hipersensibilidad. Por este motivo, se recomienda que el procedimiento sea realizado exclusivamente por profesionales médicos capacitados y bajo condiciones estériles adecuadas.

Recomendaciones para su aplicación:

HYALUXE solo debe ser aplicado por personal médico calificado y capacitado en la aplicación de rellenos dérmicos.

Antes de iniciar el tratamiento, se debe informar al paciente sobre las indicaciones del producto, sus contraindicaciones y los posibles efectos secundarios.

La zona a tratar debe estar desinfectada.

Asegúrese de inyectar únicamente en condiciones estériles. El envase de Hyaluxe y las agujas incluidas son de un solo uso por lo que no deben reutilizarse.



HYALUXE LIPS, DEEP Y SHAPE

Técnica de aplicación:

La técnica de aplicación será la determinada por el médico, en todo caso el producto deberá ser colocado de manera lenta y uniforme evitando depósitos excesivos.

Antes de iniciar con la inyección, se debe purgar la jeringa evitando así introducir aire al tejido, empujando el embolo de la jeringa hasta observar que salga una pequeña gota de producto en la aguja previamente colocada.

Una vez que la aguja esté dentro del tejido y antes de introducir el producto, se debe realizar una aspiración retrayendo el émbolo de la jeringa por unos segundos para asegurar una zona segura de aplicación.

En caso de que la piel se torne pálida al momento de la aplicación del producto, se debe suspender la infiltración y masajear hasta que la piel recupere su tono normal, o bien disolver el producto si es necesario.

Precauciones

Los productos de ácido hialurónico presentan una incompatibilidad conocida con sales de amonio cuaternario como el cloruro de benzalconio, por lo que se debe evitar en su totalidad que entre en contacto con esta sustancia o con instrumental médico que la contenga.





Contraindicaciones

El uso de HYALUXE está contraindicado en:

- Por presentar sensibilidad a cualquier componente del producto.
 - Pacientes con trastornos de la coagulación sanguínea, o terapia anticoagulante no controlados.
 - Pacientes con procesos infecciosos, inflamatorios o lesiones cutáneas activas en la zona de aplicación.
 - Aplicación en áreas previamente tratadas con otros materiales de relleno o implantes sin evidencia clínica de compatibilidad.
 - Post-procedimientos dermatológicos recientes como laser, peelings químicos u otros tratamientos invasivos.
 - Por consideración médica.
-

Advertencia

La aplicación de HYALUXE debe ser realizada exclusivamente por personal médico calificado y certificado, con formación en anatomía facial, técnicas de inyección y manejo de complicaciones, en un entorno clínico adecuado.


Precauciones

Este producto debe ser utilizado exclusivamente por personal médico capacitado, con formación en técnicas de inyección y conocimiento profundo de la anatomía facial, cumpliendo estrictamente con las normas sanitarias y regulaciones vigentes. Su aplicación debe realizarse en condiciones estériles, bajo una adecuada valoración clínica del paciente y siguiendo protocolos de seguridad que minimicen riesgos y garanticen resultados óptimos.

Instrucciones para médicos

El médico debe realizar una valoración mediante una exploración física de la zona a tratar, el llenado de la ficha clínica y la expectativa del paciente para determinar si es apto para el tratamiento con HYALUXE, debe de informarle sobre las características del producto, contraindicaciones, advertencias, precauciones, posibles reacciones adversas así como métodos de inyección del producto.

Tanto el envase como el producto son de uso individual y de un solo uso, por lo que al terminar el procedimiento la jeringa y las agujas deben desecharse de acuerdo a las normativas vigentes, garantizando así la bioseguridad y evitando posibles accidentes.

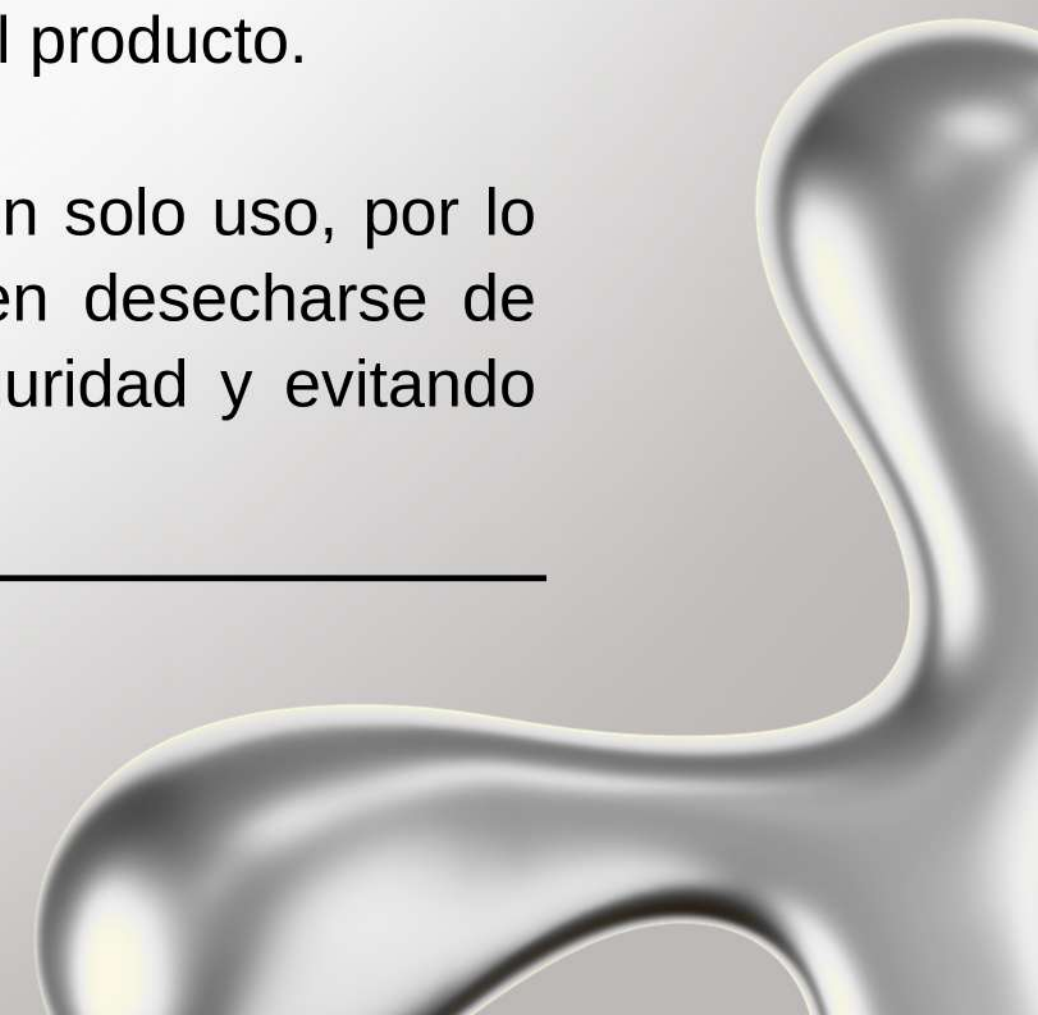

Instrucciones para el paciente

Cuidados posteriores para el paciente:

- Evitar manipular o masajear la zona de aplicación, durante 24 horas.
- No realizar ejercicio vigoroso e intenso.
- No debe exponerse a fuentes de calor (sol, saunas, albercas, playa etc)
- No consumir alcohol, durante las 24 horas posteriores a la aplicación.

Es normal presentar ligero eritema, edema o sensibilidad transitoria, los cuales suelen resolverse de manera espontánea. Ante cualquier signo inusual, o persistente, se debe contactar al médico tratante.


 **HYALUXE LIPS**



 **HYALUXE DEEP**



 **HYALUXE SHAPE**

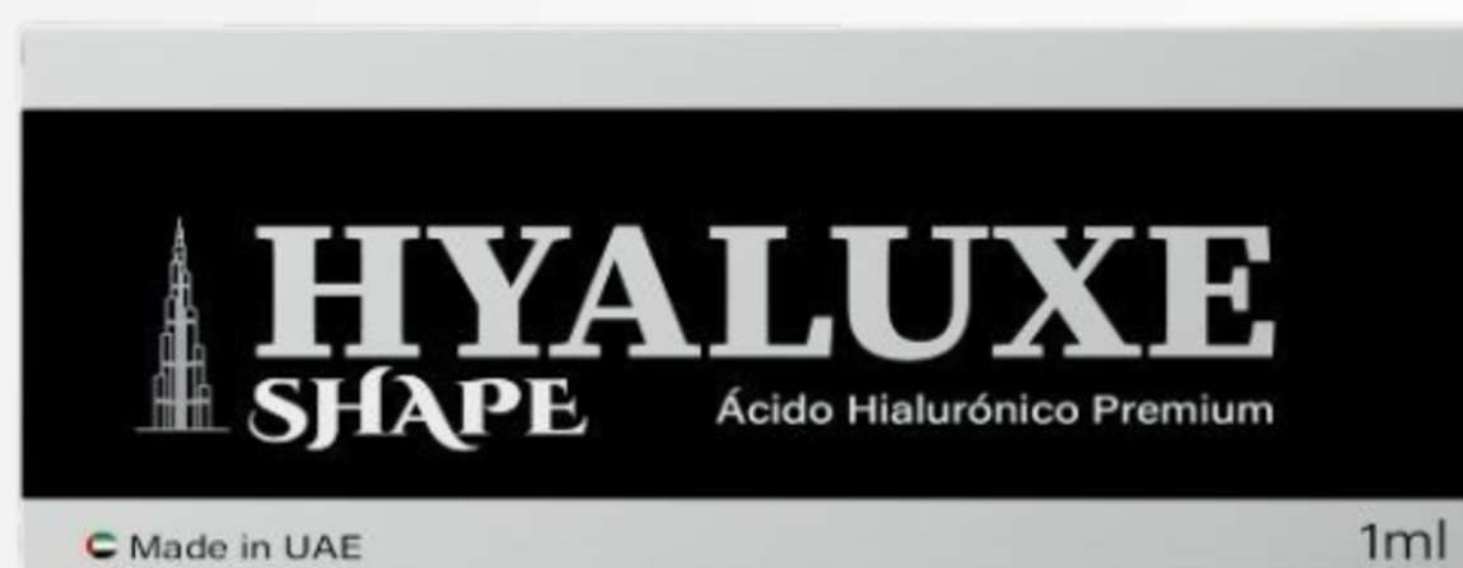

HYALUXE

تتميز بالفخامة والتميز

CIENCIA Y LUJO EN CADA GOTA

